

품목명 : 의료용 게이지

제품명 : Parallel Pin, Depth Gauge

사용목적 : 인체 조직 등의 치수를 측정하는 기구

사용방법

Parallel Pin

Depth Gauge

가. 사용 전 준비사항

치과 임플란트 시술은 고도로 전문화 되고 복잡한 시술 과정이므로 사용법을 숙지하고 시술해야 한다.

나. 사용방법

1) Parallel Pin : 드릴링 후 고정체 식립 전 식립 방향을 확인하기 위한 기구이다.

2) Depth Gauge : 천공된 홀에 넣어 깊이를 측정하기 위한 기구이다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 직사광선을 피해 실온에 보관한다.
- 2) 사용 후 세척하여 보관한다.
- 3) 재사용 하기 전 세척 및 멸균 하여 사용한다.

(세척방법)

- 1) 증류수나 흐르는 물로 씻어 세척 후에도 남아 있는 혈흔 및 이물질을 제거하고 세척하기 힘든 곳은 Syringe 또는 부드러운 솔을 이용하여 세척한다.
- 2) 닦인 제품은 적절한 세척액 및 소독액을 사용하여 세척기, 소독기 또는 ultrasonic을 사용하여 세척 및 소독한다.

(멸균방법)

- 1) 비 멸균 의료기기이므로 반드시 Autoclave에서 멸균하여 사용한다(121°C 30분 멸균, 30분 건조).
- 2) 멸균 전에 tray에서 내부 포장재를 제거하고 결합된 구성품의 경우 멸균 효율을 높이기 위하여 분리한다.
- 3) 수술포를 이용하여 tray를 감싸고 테이프(autoclave tape)로 봉하고 멸균한다.

사용 시 주의사항

Parallel Pin

Depth Gauge

- 임플란트 시술 교육 및 실습을 마친 치과의사만이 사용할 수 있다.
- 본 제품은 의료기기로서 시술 전에 반드시 Autoclave에서 고압증기멸균한 후 사용한다.
(121°C 30분 멸균, 30분 건조)
- 오작동 또는 손상 발생 시, 즉시 제품의 사용을 중단하도록 한다.
- 골질환(골다공증, 골연화증), 골 대사장애 등이 있을 경우 시술 전에 이를 신중히 고려한다.

제조사: (주)아름덴티스트리

대전광역시 유성구 국제과학11로 23 지하 1층, 1층 일부, 2층 일부